

RELAXÖPET

Tierentspannungs-System



VERSION
Hund & Katze

Herzlich Willkommen



Vielen Dank, dass Sie sich für RelaxoPet® für Hunde und Katzen entschieden haben.

Dieses Handbuch enthält eine ausführliche Beschreibung sowie die Nutzungs- und Bedienhinweise der Version RelaxoPet® für **Hunde und Katzen**. Diese soll Sie dabei unterstützen, RelaxoPet® besonders effektiv bei Ihrem Tier einzusetzen.

Lesen Sie **vor** dem Gebrauch von RelaxoPet® die Bedienungsanleitung **sorgfältig** und **vollständig** durch und bewahren Sie diese auf.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auch auf unserer Webseite unter www.relaxopet.com oder nutzen Sie bei Fragen unseren E-Mail Kundenservice unter service@relaxopet.com

Wichtiger Hinweis:

Dieses Produkt ist ausschließlich zur Anwendung bei Hunden und Katzen bestimmt.

RelaxoPet® ist kein Ersatz für eine tierärztliche Diagnose und Behandlung bei Krankheiten.

Wenn Ihr Tier gesundheitliche Probleme hat, konsultieren Sie einen Tierarzt!

Verpackungsinhalt:

RelaxoPet® Soundmodul
RelaxoPet® USB Ladekabel
Kurzbedienungsanleitung



Seite	2	Herzlich Willkommen
Seite	3	Inhaltsverzeichnis
Seite	4	Sicherheitshinweise
Seite	5	Anwendungsgebiete / Einsatzmöglichkeiten für Hunde und Katzen
Seite	6	Funktionsbeschreibung RelaxoPet®
Seite	7	Wissenswertes rund um RelaxoPet®
Seite	8	Das Soundmodul auf einen Blick - Die ersten Einstellungen
Seite	9	Das Soundmodul auf einen Blick - Lautstärke / Pause / Play
Seite	10	Das Soundmodul auf einen Blick - Betriebs- und Ladezustand
Seite	11	Das Soundmodul auf einen Blick - Ruhemodus / Neustart
Seite	12	Richtiger Umgang mit dem integrierten Lithium-Ionen-Akku
Seite	13	Anwendung von RelaxoPet® Version für Hunde Teil 1
Seite	14	Anwendung von RelaxoPet® Version für Hunde Teil 2
Seite	15	Anwendung von RelaxoPet® Version für Katzen Teil 1
Seite	16	Anwendung von RelaxoPet® Version für Katzen Teil 2
Seite	17	Transport und Reisen mit RelaxoPet®
Seite	18	Tipps und Fehleranalyse

Zeichenerklärungen



Empfehlung



Sicherheitshinweis



Sicherheitshinweise

Bitte vor Anwendung beachten

Gefahr von Ersticken! Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern.

Das Gerät darf nur zur Entspannung von Hunden und Katzen benutzt werden.

Personen mit Hörschäden sollten darauf achten, RelaxoPet® nicht zu laut einzustellen!

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Beschädigungen daran erkennbar sind.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Gefahr von Hörschädigungen durch hohe Schallfrequenzen! Halten Sie das laufende Gerät nicht direkt für längere Zeit an Ihr Ohr.

Elektrische Bauteile dürfen nicht in Wasser getaucht und müssen vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen geschützt werden. Sollte Feuchtigkeit in die Geräte eingedrungen sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Entfernen oder ändern Sie keine Teile oder führen Sie Reparaturen niemals selbst durch, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines Elektroschocks. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Händler.

Stellen Sie das Soundmodul nie auf schrägen und unebenen Oberflächen ab. Es könnte umkippen, herunterfallen und Verletzungen verursachen.

RelaxoPet® ist kein Spielzeug ! Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Bewahren Sie RelaxoPet® ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.

RelaxoPet® ist ein Präzisionsgerät. Lassen Sie es nicht fallen oder vermeiden Sie Stoß- und übermäßige Krafteinwirkung.

RelaxoPet® wurde ausschließlich für den Hörbereich von Hunden und Katzen entwickelt und darf nicht bei anderen Tierarten eingesetzt werden.

Achten Sie darauf, dass RelaxoPet für den Hund oder die Katze nicht zugänglich ist.

Verwenden Sie zur Reinigung keine kratzenden oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Decken Sie das Soundmodul bzw. den Lautsprecher während der Anwendung nicht ab!

Einsatzgebiete und Anwendungsmöglichkeiten

Stressoren adé

RelaxoPet® kann erfolgreich dabei helfen, verschiedenste Stressoren zu vermeiden, wie:

Ausbildungsstress	destruktives Verhalten	Hyperaktivitäten	ständiges Bellen bei Hunden
Aggressivität	Fehlverhalten	mangelhaftes Sozialverhalten	Trennungsängste
Angstzustände	Feuerwerk	Markierungsverhalten (plötzlich auftretend)	Umgebungsveränderungen
allgemeine Beruhigung	Gewitter	Rangordnungsstörungen	Zwangsstörungen
Besitzerwechsel	Panik	Reiseangst	und vieles mehr





Funktionsbeschreibung

So funktioniert die all-in-one Lösung zur Tiefenentspannung für Hunde und Katzen

RelaxoPet® wurde im Bereich der unbewussten Tiefenentspannung für alle Hunde und Katzen speziell auf den sensiblen Hörsinn (je nach Einstellung) abgestimmt und in enger Zusammenarbeit mit Tierärzten, Verhaltens-therapeuten und Züchtern entwickelt.

RelaxoPet® ist nicht vergleichbar mit üblichen Entspannungsmusiken für Tiere, denn RelaxoPet® beinhaltet neben den hörbaren, eigens komponierten Klangwellen zusätzlich weitere sechs für das menschliche Gehör nicht bewusst wahrnehmbare hochfrequente **silent, subliminale Tonträgerspuren**, die einen tiefenentspannten, ruhigen Zustand auslösen können.

Zudem besteht bei RelaxoPet® die Möglichkeit, die für den Menschen hörbaren Klangwellen **mittels Wahlschalter** vollständig zu unterdrücken, so dass RelaxoPet® ausschließlich mit den unhörbaren, nicht bewusst wahrnehmbaren silent, subliminalen Tonträgerspuren arbeitet.

RelaxoPet® arbeitet dabei vollautomatisch, effektiv, unabhängig vom Alter oder Rasse Ihres Hundes oder Ihrer Katze im In- und Outdoorbereich. RelaxoPet® ist ein idealer Begleiter bei Reisen und in allen tierfremden Umgebungen und arbeitet durch den leistungsstarken Akkubetrieb völlig unabhängig von einer Steckdose.

Sollten Sie einmal ein "ungewöhnliches Geräusch" in der hörbar komponierten Klangwellen wahrnehmen, so stellt dieses keinen Mangel dar, sondern ist vielmehr ein Qualitätsmerkmal der hochfrequent, hinterlegten Tonspuren.





Wissenswertes und Wichtiges

Alles rund um Ihren neuen Entspannungstrainer RelaxoPet®

RelaxoPet® dient **nicht** als Ersatz einer tiergerechten Erziehung und Haltung.

Bitte geben Sie sich und Ihrem Tier etwas Zeit, sich an diese neuartige Tiefenentspannung zu gewöhnen. Beginnen Sie, nach einer Tiefenentspannungsphase durch RelaxoPet® nicht umgehend mit sportlichen Aktivitäten bei Hunden, wie Training, Agility, Sporthunde-, Rettungs- oder Such- und Diensthundeinsätzen. Beenden Sie die Beschallung bitte spätestens 30 Minuten vor einer **aktiven** Zusammenarbeit mit Ihrem Tier.

Wir bitten um Beachtung, dass RelaxoPet® durch seine eigens entwickelten hörbaren Klangmuster auch beim Menschen einen beruhigenden und tiefenentspannten Zustand auslösen kann.



Das Soundmodul

Das RelaxoPet[®] Soundmodul auf einen Blick

1



Tiergruppenwahlschalter

Wählen Sie Ihre Tiergruppe


2



Wahlschalter Klangwellen

(hörbar/unhörbar)

3

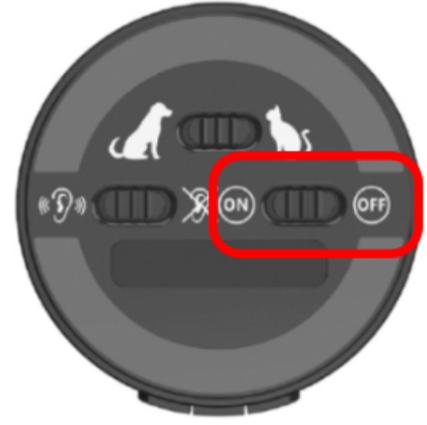

An- / Aus- Schalter

Das Soundmodul

Das RelaxoPet® Soundmodul auf einen Blick



Lautstärkeeinstellung:

Lautstärke ist in 14 Stufen einstellbar.
(Startlautstärke ist immer mittlere Lautstärke)

Bei Neustart aus Ruhemodus beginnt RelaxoPet® automatisch mit mittlerer Lautstärke.

Play und Pause:

Durch einmaliges Drücken der Taste **▶||** während des Betriebs wird RelaxoPet® sofort angehalten. Wird dann innerhalb von 10 Minuten keine Aktion ausgeführt, geht RelaxoPet® in den Ruhemodus.

Im Ruhemodus ist die blaue Betriebsanzeige LED immer noch an, während alle anderen LEDs aus sind.

Im Ruhemodus kann das Gerät durch erneutes Drücken der Taste **▶||** wieder aktiviert werden.

Decken Sie das Soundmodul bzw. den Lautsprecher während der Anwendung nicht ab!

Das Soundmodul

Das RelaxoPet® Soundmodul auf einen Blick



Betriebs/Ladezustand LEDs:

Die grünen LED zeigen im Betrieb den aktuellen Ladezustand an:

1 LED = 20%, 2 LED = 50%, 3 LED = 100 %.

Beim Laden blinken die LED grün – ist der Akku mehr als 20% geladen, dann bleibt die erste LED dauerhaft grün und die 2. LED blinkt. Ist der Akku mehr als 50% geladen, bleiben die ersten zwei LEDs dauerhaft grün und die 3. LED blinkt grün -- wenn der Akku komplett geladen ist, leuchten alle LEDs dauerhaft grün.

Laden Sie RelaxoPet®erneut auf, wenn die Ladeanzeige 1 grüne LED anzeigt.

Die grünen LEDs sind im Ruhemodus aus.

Die blaue LED leuchtet dauerhaft, wenn

- RelaxoPet® in Betrieb ist
- RelaxoPet® im Ruhemodus ist
- RelaxoPet® durch Pausetaste angehalten wird

Das Soundmodul

Das RelaxoPet[®] Soundmodul auf einen Blick



Ruhemodus

Das Gerät schaltet unter folgenden Bedingungen in den Ruhemodus:

- Nach 120 Min. Spielzeit, wenn das Gerät zwischendurch nicht bedient wurde.
- Wenn die **▶||** Taste gedrückt wurde und 10 Minuten keine weitere Aktion durchgeführt wurde.

Im Ruhemodus bleibt die blaue Betriebsanzeige LED eingeschaltet.

Die grünen LEDs sind aus. Um das Gerät für die Wiedergabe zu aktivieren, erneut die **▶||** Taste drücken.

Neustart:

Das Gerät startet unter folgenden Bedingungen neu:

- Wenn das Gerät anhand des Schiebereglers eingeschaltet wird – Beginn der Musik, mittlere Lautstärke.
- Wenn **▶||** gedrückt wurde und innerhalb von 10 Minuten erneut gedrückt wird. Das Gerät läuft mit der zuletzt verwendeten Lautstärke und Musik weiter.
- Wenn sich das Gerät im Ruhemodus befindet und die **▶||** Taste zur erneuten Inbetriebnahme gedrückt wird. Das Gerät startet neu, in mittlerer Lautstärke.

Lithium-Ionen-Akkus



Der richtige Umgang mit dem integrierten Lithium-Ionen Akku

Wichtig ist, dass Sie das RelaxoPet® Soundmodul **vor** der ersten Benutzung vollständig laden, um die volle Kapazität des integrierten Lithium-Ionen-Akkus herzustellen.

Lademöglichkeiten RelaxoPet® Soundmodul

RelaxoPet® verfügt über einen fest eingebauten Akku mit einer langen Betriebsdauer und kann über das beigefügte USB-Ladekabel an einem USB-Anschluss geladen werden. Die Ladezeit beträgt 30-90 Minuten (je nach USB-Stromspannung).

Bei Reisen oder Transporten kann das Soundmodul im 12V -Anschluss eines Fahrzeuges (ständig) während der Benutzung geladen werden.

Achtung !

Vermeiden Sie den Einsatz unter extrem kalten oder heißen Bedingungen, da dies die Akkulebensdauer beeinträchtigen kann.

Setzen Sie das Soundmodul keinen Temperaturen über +45°C aus, da der integrierte Akku Schaden nehmen kann.

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in der Europäischen Union



Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen das Altgerät an einer Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihres Altgeräts hilft, Rohstoffe zu sparen und sicherzustellen, dass bei seinem Recycling die menschliche Gesundheit und die Umwelt geschützt werden. Weitere Informationen, wo Sie Ihr Altgerät zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer lokalen Kommunalverwaltung, Ihrem Haushaltsabfall- Entsorgungsdienst oder bei der Verkaufsstelle Ihres Produkts.

Anwendung

Version für Hunde

RelaxoPet® arbeitet vollautomatisch, jedoch muss sich Ihr Hund erst an das Gerät gewöhnen, bevor Sie es regelmäßig anwenden. Es ist wichtig, dass Sie sich beim ersten Einsatz von RelaxoPet® neutral und ruhig dem Hund gegenüber verhalten. Wählen Sie bei der Benutzung in den ersten Tagen den **hörbaren Modus** in normaler Lautstärke.

Beginnen Sie mit der Beschallung **nie** in direkter Verbindung mit einem für den Hund aufregenden Erlebnis / Ereignis (Ausnahmefall: Gewitter / Unwetter / Feuerwerk), da dies eine ungewünschte Konditionierung auslösen oder bestehende Probleme eventuell verstärken kann.

Positionierung von RelaxoPet®

Positionieren Sie RelaxoPet® Indoor in einem Umkreis von max. 5 m / Outdoor max. 3 m (siehe Skizze unten), im Hauptaufenthaltsbereich des Hundes und achten Sie darauf, dass RelaxoPet® durch Ihren Hund unerreichbar ist.

Eintritt der Tiefenentspannung

Je nach Ausgangssituation und Beschallungsintervallen des Hundes ist der Zeitraum des Entspannungseintrittes unterschiedlich. Dies steht in Abhängigkeit der Ausgangssituation und Stärkegraden der jeweiligen Stressoren. Verzichten Sie während der ersten Beschallungsintervalle auf zusätzliche Verhaltenskorrekturen.

Beschallungsdauer / Beschallungsintervalle

Die tägliche Beschallungsdauer sollte nicht mehr als 120 Minuten betragen. Länger andauernde Beschallungsintervalle sind völlig unbedenklich, sollten jedoch aufgrund der Aktivitätsrelevanzen unterbleiben.

Lautstärkeeinstellung

Beachten Sie, dass ein Hund bis zu 20 mal besser hört als Menschen.

Die werkseitige Einstellung beim Systemstart von RelaxoPet® ist ausreichend bei normalen Umgebungsgerauschen.

Passen Sie bei Bedarf über die **±** Tasten die Lautstärke den Umgebungsgerauschen an.



Reichweite Indoor



Reichweite Outdoor

Anwendung

Version für Hunde

Bereits nach kurzer Eingewöhnungsphase kann damit begonnen werden die unhörbaren, subliminal hochfrequenten Klangwellen vollumfänglich zu nutzen.

Bekannte und tierfremder Umgebung

Sollte sich der Hund nach der Eingewöhnungsphase alleine in der Wohnung / dem Haus oder in bekannter Umgebung befinden, können Sie wahlweise die hörbaren oder unhörbaren (Schalter siehe Seite 8 / Punkt 1) Klangwellen in Ihrer Abwesenheit benutzen.



Starten Sie jedoch immer mit einer mind. 15 minütigen Vorbeschallung vor jeder Abwesenheit !

In allen **tierfremden** Umgebungen empfehlen wir jedoch, ausschließlich die hörbaren Klangwellen zu benutzen.

Beachten Sie trotz Tiefenentspannung, Hunde nie länger als nötig alleine zu lassen. RelaxoPet® dient nicht dazu, Abwesenheiten zu verlängern.

Ganzjährige Outdoorhaltung

Bei einer ganzjährigen Outdoorhaltung kann eine problemorientierte Beschallung erfolgen.

Achten Sie bei dieser besonderen Haltungsform jedoch auf eine möglichst zentrale Ausrichtung von RelaxoPet®.

Gewitter / Feuerwerk

Bei plötzlichen Ereignissen, wie Gewitter und Feuerwerk, kann sich der Hauptaufenthaltsbereich des Hundes ändern.

Benutzen Sie RelaxoPet® zusammen mit den hörbaren Klangwellen direkt am ausgewählten Wohlfühlplatz des Hundes.



Anwendung

Version für Katzen

RelaxoPet® arbeitet vollautomatisch, jedoch muss sich Ihre Katze erst an das Gerät gewöhnen, bevor Sie es regelmäßig anwenden. Es ist wichtig, dass Sie sich beim ersten Einsatz von RelaxoPet® neutral und ruhig der Katze gegenüber verhalten. Wählen Sie bei der Benutzung in den ersten Tagen den **hörbaren Modus** in normaler Lautstärke.

Beginnen Sie mit der Beschallung **nie** in direkter Verbindung mit einem für die Katze aufregenden Erlebnis / Ereignis (Ausnahmefall: Gewitter / Unwetter / Feuerwerk) da dies eine ungewünschte Konditionierung auslösen oder bestehende Probleme eventuell verstärken kann.

Positionierung von RelaxoPet®

Positionieren Sie RelaxoPet® Indoor in einem Umkreis von max. 5m (siehe Skizze unten), im Hauptaufenthaltsbereich der Katze und achten Sie darauf, dass RelaxoPet® durch Ihre Katze unerreichbar ist.

Eintritt der Tiefenentspannung

Je nach Ausgangssituation und Beschallungsintervallen der Katze, ist der Zeitraum des Entspannungseintrittes unterschiedlich. Dies steht in Abhängigkeit der Ausgangssituation und Stärkegraden der jeweiligen Stressoren. Verzichten Sie während der ersten Beschallungsintervalle auf zusätzliche Verhaltenskorrekturen.

Beschallungsdauer / Beschallungsintervalle

Die tägliche Beschallungsdauer sollte nicht mehr als 120 Minuten betragen.

Länger andauernde Beschallungsintervalle sind völlig unbedenklich, sollten jedoch aufgrund der Aktivitätsrelevanzen unterbleiben.

Lautstärkeneinstellung

Bitte beachten Sie, dass eine Katze bis zu 30 mal besser hört als Menschen.

Die werkseitige Einstellung beim Systemstart von RelaxoPet® ist ausreichend bei normalen Umgebungsgläuschen.

Passen Sie bei Bedarf durch die Tasten **±** die Lautstärke zu den Umgebungsgläuschen an.



Reichweite Indoor

Anwendung

Version für Katzen

Bereits nach kurzer Eingewöhnungsphase kann damit begonnen werden die unhörbaren, subliminal hochfrequenten Klangwellen vollumfänglich zu nutzen.

Bekannte und tierfremder Umgebung

Sollte sich die Katze nach der Eingewöhnungsphase allein in der Wohnung / dem Haus oder in bekannter Umgebung befinden, können Sie wahlweise die hörbaren oder unhörbaren (siehe Seite 8 Punkt 1) Klangwellen in Ihrer Abwesenheit benutzen.

Starten Sie jedoch immer mit einer mind. 15 minütigen Vorbeschallung vor jeder Abwesenheit!

In allen **tierfremden** Umgebungen empfehlen wir jedoch, ausschließlich die hörbaren Klangwellen zu benutzen.

Beachten Sie trotz Tiefenentspannung, Katzen nie länger als nötig alleine zu lassen. RelaxoPet® dient nicht dazu, Abwesenheiten zu verlängern.

Gewitter / Feuerwerk

Bei plötzlichen Ereignissen, wie Gewitter und Feuerwerk, kann sich der Hauptaufenthaltsbereich der Katze ändern. Benutzen Sie RelaxoPet® zusammen mit den hörbaren Klangwellen direkt am ausgewählten Wohlfühlplatz der Katze.



Transport und Reisen

Sicher Reisen mit RelaxoPet[©]

RelaxoPet[©] bei Auto-Transporten

Bringen Sie RelaxoPet[©] bei allen Fahrten sicher im Fahrzeug an und beachten Sie, dass sich dieses nicht beim plötzlichen Bremsen oder Unfällen im Fahrgastraum lösen kann.

Denken Sie daran, dass RelaxoPet[©] vor Reiseantritt vollständig geladen ist.



RelaxoPet[©] bei Flugreisen

Kontaktieren Sie **vor** Reisebeginn die Fluggesellschaft und weisen Sie darauf hin, dass Sie RelaxoPet[©] während der Flugreise einsetzen möchten.

Durch die Vielzahl der Fluggesellschaften und die verschiedensten Transportbedingungen können wir keine Garantie dafür übernehmen, dass die Fluggesellschaft den Transport mit RelaxoPet[©] duldet.




Wählen Sie bei der gesamten Flugreise den für Menschen unhörbaren Tonmodus.



Beachten Sie bei allen länderübergreifenden Transporten die jeweiligen Zoll- und Landesbedingungen.

Tipps und Fehleranalyse

Alle RelaxoPet® Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Sollte ein hier nicht aufgeführter Fehler eingetreten sein, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an unseren Kundenservice unter service@relaxopet.com mit Angabe der Fehlerbeschreibung.

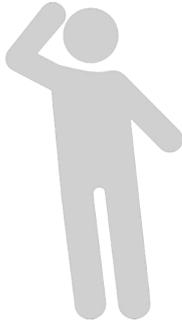

Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird. Wie bei jedem anderen Gerät ist die richtige Handhabung eine wesentliche Voraussetzung für ein gutes Ergebnis.

Das Öffnen des Gerätes führt zum sofortigen Erlöschen der Gewährleistung.

Problem	Eventuelle Ursache	Lösung
blaue LED leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none">• Akku nicht geladen• An- / Ausschalter nicht betätigt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät geladen und der An- / Ausschalter betätigt worden ist.
blaue LED leuchtet, aber kein hörbarer Ton	<ul style="list-style-type: none">• Wahlschalter im falschen Modus	Betätigen Sie den Wahlschalter auf hörbaren Ton.
Tier entspannt nicht	<ul style="list-style-type: none">• falscher Tiermodus gewählt• falscher Einsatz des Gerätes• tiermedizinische Erkrankung	Lesen Sie Seite 8 / Punkt 1. Lesen Sie Seite 13 bis 16 (je nach Tiergruppe). Konsultieren Sie Ihren Tierarzt.

RelaxoPet® unterliegt dem Markenrecht und Copyright

Bildrechte: RelaxoPet/Fotolia

RelaxoPet GmbH

The RelaxoPet trademark is used with permission of RelaxoPet GmbH

www.relaxopet.com

Created 10-18